


Sonata

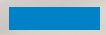


Conexiones de sensores



Variantes de aplicación

Variante de aplicación 1: Forma de V con gafas nasales/termistor *

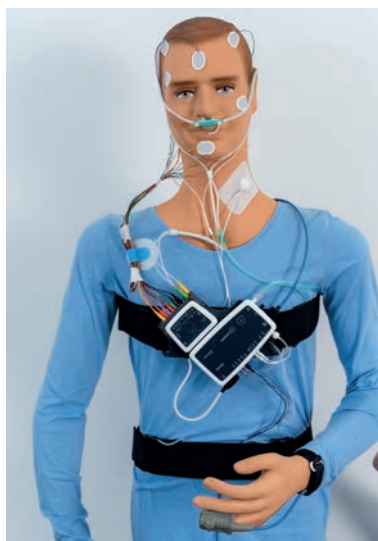


Cable de conexión
Módulo principal y
módulo neurológico

Variante de aplicación 2: Aplicación separada con adaptador en T*





Adaptador en T

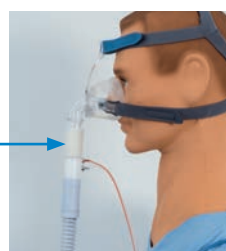



*Son posibles ambas variantes de aplicación tanto con cánula nasal/termistor como con adaptador en T.

Instrucciones de cableado: Módulo neurológico estándar y módulo neurológico 10-20



Instrucciones de cableado - EEG

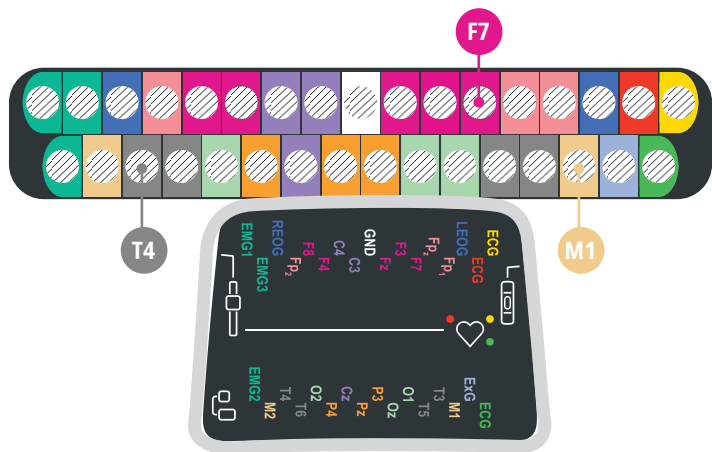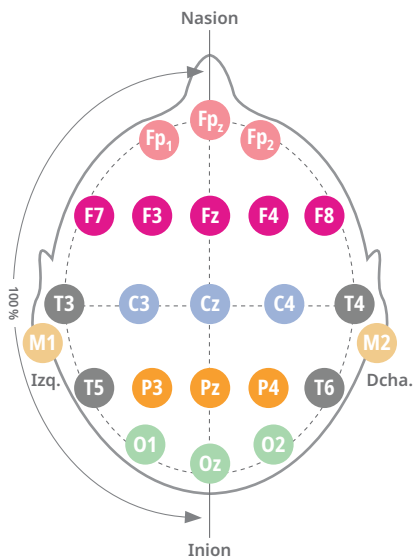

Instrucciones de cableado - EOG, barbilla EMG, GND

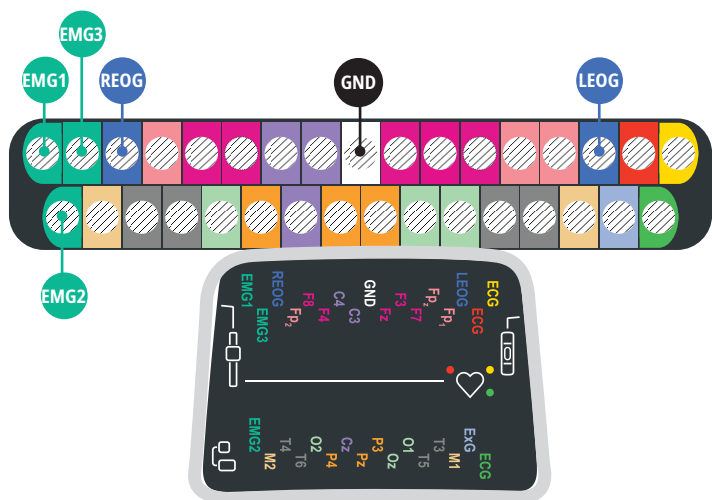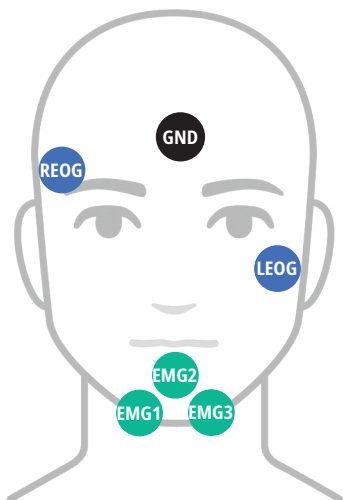

Instrucciones de cableado - ECG

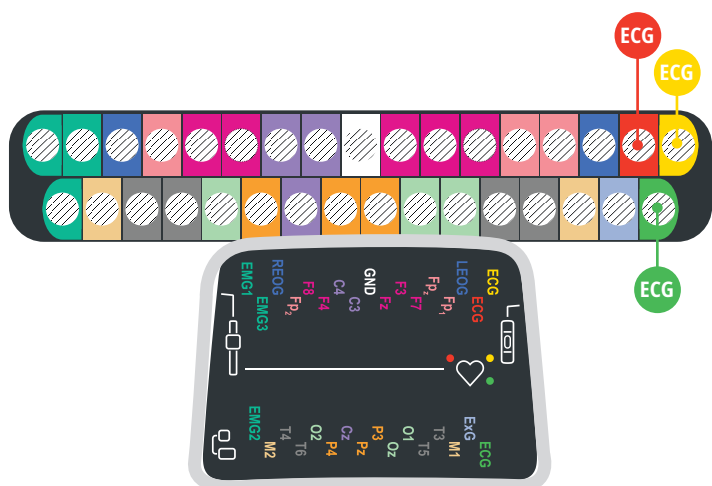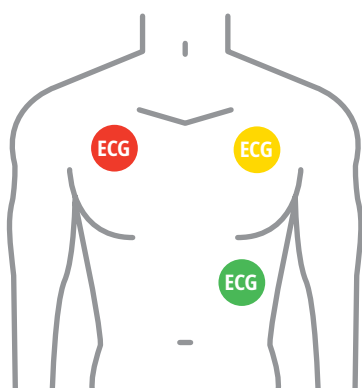

Conexiones del módulo principal



Conexión para **adaptador en T** o la **cánula nasal**



Conexión para **cable de conexión**
Módulo principal y módulo neurológico

	Cable de conexión Módulo principal / neurológico		Electrodo de masa ¡Atención! Cuando se utilice el módulo neurológico, use la conexión GND del módulo neurológico y déjela libre en el módulo principal.		Abdomen
	Conexión de electrodos Pierna izquierda 1				Pinza para el dedo SpO₂ (conexión inferior, más grande) IOIOIO – conexión para cable de conexión a PC/rojo (conexión superior, más pequeña)
	Conexión de electrodos Pierna izquierda 2		Termistor		Tapón roscado negro del adaptador en T
	Conexión de electrodos Pierna derecha 1		Micrófono de ronquidos		Cánula nasal o tapón roscado blanco del adaptador en T
	Conexión de electrodos Pierna derecha 2		Tórax		



Módulo neurológico completamente cableado

